



Aide à la conduite et au transport
de personnes à mobilité réduite

Garage COLIN-MARTIN

41 RUE BARTHELEMY GAUTIER – BP 2
17800 PONS

☎ : 05.46.94.00.25 ☎ : 05.46.91.38.90

✉ : handi-service-equipement@orange.fr

Accélérateur pied gauche mécanique

Il permet la conduite,
avec le pied gauche, de
tout véhicule possédant
une boîte de vitesses
automatique.



Selon le besoin, la pédale d'accélérateur d'origine peut rester en place ou être transformée en pédale amovible. Dans le cas où les 2 pédales restent en place, elles sont toutes deux fonctionnelles !

Pose et Dépose d'une pédale:

Le montage de la pédale est réalisé par un système de baïonnette.

Montage :

1. Pousser la pédale dans le logement de fixation.
2. Tourner la pédale pour la bloquer.
3. Relâcher la pédale.

Démontage :

Procéder en sens inverse



Cet équipement est spécifique au véhicule sur lequel il est monté et ne pourra que difficilement être transféré sur un autre type de voiture.